



AdVance™

MALE SLING SYSTEM

Procedimiento Quirúrgico

1. Incisión en la línea media perineal inferior
 - 5-7 cm
 - Introducir el catéter Foley
2. Separar el músculo BC en la línea media
 - Abrir como un libro
3. Efectuar la disección hasta el tendón central /cuerpo perineal
4. Pasar las agujas
 - Efectuar incisiones de 1cm por debajo y lateral a la inserción del tendón aductor mediano en el borde medial del agujero obturador
 - Utilizar una aguja espinal para tocar el hueso
 - Practicar rotando cada aguja por encima del paciente a fin de visualizar el recorrido
 - Mantener un eje constante de rotación de 45° aproximadamente
 - Guiar la punta de la aguja hacia el dedo en la incisión perineal entre la uretra y el cuerpo cavernoso
5. Implantar y dar tensión al cabestrillo
 - El extremo del cabestrillo se inserta en la punta de la aguja (imposible retirarlo)
 - Suturas (y puntos azules) deberán colocarse orientada lejos de la uretra
 - Coser los colgajos centrales con Monocryl 3-0: primero, el colgajo distal, luego estirar el cabestrillo y, después, el colgajo proximal
 - Tirar los extremos del cabestrillo con suficiente fuerza para alcanzar un movimiento del bulbo uretral entre 2 y 4 cm y, luego, retirar las cubiertas de plástico y comprobar el desplazamiento proximal del bulbo

Cuidados Postoperatorios

- Lograr la correcta micción antes de dar de alta al paciente
- Ordenar al paciente que evite efectuar actividades intensas durante 4 a 6 semanas.

Candidatos Aptos para el AdVance™

- Post RP o TURP
- Incontinencia de ligera a moderada:
 - 1-5 ppd, <200 g 1 hora pad wt.
- Función de esfínter residual observada mediante endoscopia
- No haber sido sometido a radiación en los últimos 6 meses

Factores Críticos de Éxito

- Posición de las piernas: el paciente deberá colocarse en una posición de litotomía dorsal, con las piernas dobladas a 90° y ligeramente extendidas
- Preparación con alcohol/yodo del periné
- Incisión de la línea media cerca al ano
- Exposición del bulbo uretral
- Localización de la inserción de la aguja
- Observación de la trayectoria de la aguja
- Sutura del colgajo distal y, luego, del colgajo proximal
- Observar el movimiento proximal de 2-4 cm
- Eliminación de los espacios muertos

Por favor, sírvase referir a las Manual de Usuarios de AdVance™ para más información, incluyendo el procedimiento, indicaciones de uso, efectos secundarios, esterilización, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

AMS
Solutions for Life™